



MASQUE DE PROTECTION

LAVABLE & RÉUTILISABLE

RECOMMANDATIONS

- Il est recommandé de laver quotidiennement le masque;
- · S'assurer que le masque est en bon état en effectuant une inspection visuelle;
- Éviter de toucher l'intérieur du masque pour prévenir la contamination;
- Il est recommandé de n'avoir aucune pilosité faciale:
- Laver le masque ou en disposer après chaque utilisation. Ne pas remettre le masque sans avoir suivi les instructions;
- Ne pas porter le masque durant plus de 12 heures consécutives.

INSTRUCTIONS POUR METTRE UN MASQUE FILTRANT DIV20

- · Avant de toucher le masque, lavez vos mains;
- · Prendre le masque dans la paume de votre main, la partie pour le nez vers le haut;
- · Envoyer la bande élastique supérieure derrière votre main (dessus de la main) et prendre la bande élastique inférieure dans l'autre main;
- Appuyer le masque sur le menton et passer la bande élastique inférieure derrière la tête à la base près du cou;
- · Appuyer ensuite le masque sur le nez et passer la bande élastique supérieure derrière la tête au centre:
- · Prendre les deux extrémités de la bande élastique supérieure et inférieure et tirer jusqu'à ce que le masque épouse bien la forme de votre visage;
- · Avec vos index, appliquez une pression au niveau du nez de chaque côté pour assurer l'étanchéité optimale du masque.

INSTRUCTIONS POUR ENLEVER UN MASQUE FILTRANT DIV20

- · Avant de toucher le masque, lavez vos mains:
- · Mettre la paume de la main sur le devant du masque (partie filtrante);
- · Mettre une main sur la bande élastique inférieure s'il y a lieu sinon sur la bande supérieure;
- Retirer le masque en tirant simultanément sur le masque et l'élastique vers le haut;
- · Lavez immédiatement vos mains avec du savon et de l'eau durant un minimum de 20 secondes après avoir retiré le masque.

INSTRUCTIONS POUR LAVER LE MASQUE DIV20

- · Retirer la ou les bandes élastiques:
- Déposer le masque dans le tiroir supérieur du lave-vaisselle;
- · Déposer le masque avec la membrane filtrante vers le haut;
- · Déposer le masque de manière à respecter la forme naturelle du masque (ne pas le déformer);
- Une fois le cycle terminé, déposer sur une surface propre et laisser sécher le masque un minimum de 3 heures avant de pouvoir l'utiliser à nouveau. Ne pas utiliser s'il est humide ou trempé;
- · Le masque peut aussi être lavé à la main avec un savon doux.

SOCIÉTÉ DIVOC INC. MC/TM

5200, chemin St-Gabriel, C.P. 3000 St-Félix-de-Valois, Québec, CANADA JOK 2M0

1.877.889.7277 // info@divoc.ca

www.divoc.ca





Le masque filtrant est très fonctionnel uniquement avec la bande élastique supérieure. Cependant, pour un meilleur ajustement, vous pouvez utiliser la bande élastique inférieure. Une fois l'enfilement des bandes élastiques terminé, tirez sur les deux extrémités afin d'ajuster la ou les bandes élastiques.

Pour enfiler la bande élastique selon l'ajustement de départ, veuillez suivre les instructions ci-dessous.

The filter mask is fully functional using the upper strap only. For a better fit, use the bottom strap. Once the straps are in place, pull them to adjust.

To thread the straps according to the initial fit, please follow the instructions below.

BANDE ÉLASTIQUE // STRAP

HAUT - UP 21"

BAS - DOWN 14"

